



# GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

**METRO MISURA NEONATI**  
**BABY HEIGHT MEASURE**  
**TOISE POUR NOURRISSONS**  
**MEDIDOR DE ESTATURA PARA BEBÉS**  
**MEDIÇÃO DA ALTURA DO BEBÊ**  
**GRÖSSENMESSER FÜR BABYS**  
**POMIAR WZROSTU DZIECKA**  
**CSECSEMŐ HOSSZMÉRŐ**  
**ΑΝΑΣΤΗΜΟΜΕΤΡΟ ΒΡΕΦΩΝ**

قياس طول الطفل

**REF** 27331



Gima S.p.A.  
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy  
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com  
[www.gimaitaly.com](http://www.gimaitaly.com)  
Made in China



0476



La toise pour nourrissons GIMA est un dispositif de précision pour mesurer en cm la taille des nourrissons et évaluer la courbe de croissance. La toise pour nourrissons est destinée à l'utilisation dans les cabinets pédiatriques, dans les hôpitaux pour enfants ou lors de visites pédiatriques à domicile. Des trous sont présents sur l'étrier de montage supérieur pour accrocher le matelas au mur durant sa non-utilisation. Le matelas peut mesurer 10-99 cm, avec une approximation de +/-5 mm.

## UTILISATION


### Comment prendre une mesure

1. Allonger le nourrisson sur le matelas gradué après avoir positionné correctement l'appuie-tête et l'appuie-pieds en plastique verticalement à 90° par rapport à l'échelle graduée. La tête du bébé doit être appuyée contre l'appuie-tête en plastique en tenant fermement le nourrisson de la main gauche.
  2. Avec la main droite, rapprocher l'appuie-pieds situé à la fin de l'échelle graduée des pieds du nourrisson.
  3. S'assurer que les jambes du nourrisson soient droites. Il est recommandé d'appuyer délicatement avec la main gauche sur les genoux du nourrisson vers le plan du matelas.
  4. Quand l'appuie-pieds est positionné à angle droit contre la plante des pieds de l'enfant lire la taille indiquée au bas du matelas gradué.
- En suivant les indications susmentionnées il est possible d'atteindre un niveau de précision considérable.


## INTERPRÉTATION

Mesurer la taille du nourrisson est utile pour définir la courbe de croissance correcte par le calcul des percentiles, en l'associant au poids. Le « poids et la taille » des nourrissons peuvent être comparés à des courbes de référence dénommées Tanner-Whitehouse. Ces courbes identifient des lignes (percentiles) qui définissent la fourchette considérée comme normale et acceptable en fonction de l'âge.

**Poids : garçons de 0 à 3 ans**

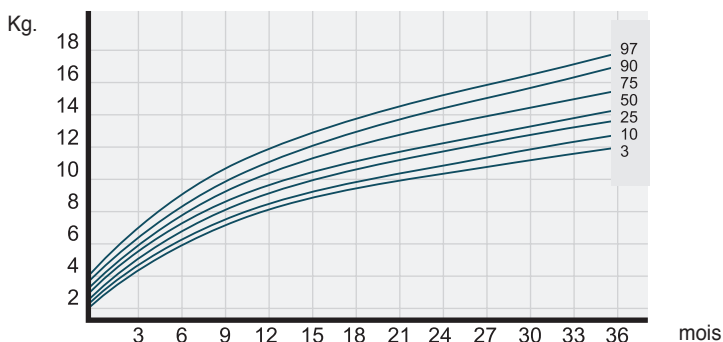

**Poids : filles de 0 à 3 ans**

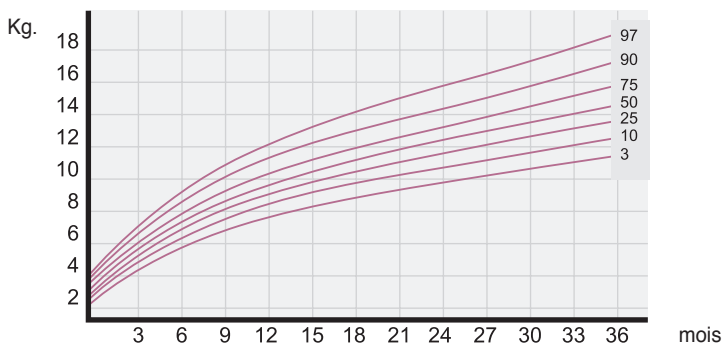

Il est souhaitable que la courbe de croissance ne soit pas trop au-dessus ou au-dessous de la moyenne (percentile 50). Un percentile de 50 (dans la ligne médiane) en taille signifie que 50% des enfants de son âge sont plus grands et que 50% sont plus petits. L'utilité de ces courbes est de mettre en évidence d'éventuelles différences qui pourraient faire supposer (et par conséquent conseiller d'effectuer une visite auprès du médecin traitant) une obésité, une absence de croissance osseuse ou une petite stature.

## NETTOYAGE

Nettoyer le matelas avec un détergent et un chiffon doux.

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ













- Ne jamais laisser le nourrisson allongé sur le matelas sans la supervision d'un adulte.
- Effectuer les mesures uniquement sur des surfaces d'appui sûres (desquelles le nourrisson ne peut pas tomber).
- Nettoyer et désinfecter régulièrement le matelas gradué.

Température ambiante pour le fonctionnement : de 0°C~40°C (32°F~104°F)

Température ambiante pour la conservation et le transport : -20°C~50°C (-4°F~122°F)

Humidité ambiante pour le fonctionnement : 15~90%

Humidité ambiante pour la conservation et le transport : 15~95%

	Fabricant		Numéro de lot
	Code produit		Limite de température
	Dispositif médical conforme à la directive 93/42 / CEE		Limite d'humidité
	Consulter les instructions d'utilisation		À conserver dans un endroit frais et sec.
	Attention: lisez attentivement les instructions (avertissements)		À conserver à l'abri de la lumière du soleil

## CONDITIONS DE GARANTIE GIMA

La garantie appliquée est la B2B standard Gima de 12 mois.