

Voisins le Bretonneux, le 01 mars 2023

Objet : Bulletin d'information Produit – ZOLL AED Plus®- Pile Duracell

ZOLL continue de recommander l'utilisation des piles Duracell Coppertop de type CR123 (DL123ABKM) avec l'AED Plus®. Cependant, il est important de noter que Duracell fabrique désormais les piles Coppertop aux États-Unis et en Chine. Bien que les piles puissent se ressembler, leurs performances sont différentes. Pour garantir une longévité optimale de l'alimentation de l'AED Plus, les clients doivent utiliser uniquement des piles fabriquées aux États-Unis. Les piles produites aux États-Unis portent la mention " Made in USA " sur l'étiquette de la cellule de la pile. Les piles produites en Chine portent quant à elles la mention " Made in China ".

Foire Aux Questions (FAQ) :


- Pourquoi l'AED Plus ne peut pas utiliser de piles CR123 ?

Il est possible que les piles fabriquées en Chine aient une composition chimique différente de celle des piles fabriquées aux États-Unis. Les piles Duracell CR123 fabriquées aux États-Unis ont été validées par ZOLL et font partie des piles approuvées figurant dans le guide d'administration de notre appareil.

- Comment puis-je savoir si ma batterie est la bonne ?

Veuillez-vous référer à l'image avec le surlignage "Made in USA".

ZOLL ne distribue que des piles Duracell "Made in USA". Les clients sont encouragés à acheter des piles Duracell de remplacement en s'adressant aux distributeurs auprès desquels ils ont acheté leur DAE ou directement auprès de ZOLL. Ou bien, à vérifier que le produit est fabriqué aux États-Unis lorsqu'il s'approvisionne localement.

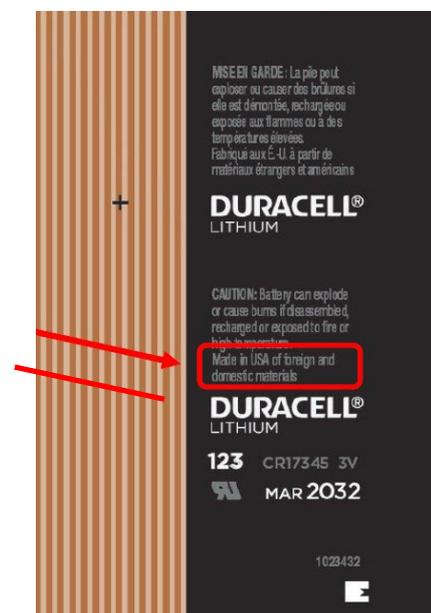

Service client - ZOLL Médical France		01.30.57.70.40		serviceclient@zoll.com
---	---	----------------	--	--