



## MODE D'EMPLOI

Article N° : 43 656 XX

### STETHOSCOPE PERFECTO

Exigence essentielle de la directive 93/42/CEE ( §13.1 de l'annexe I) :

« L'emballage de chaque dispositif doit contenir une notice d'instruction. Une exception est faite pour les dispositifs des classes I et IIa, s'ils peuvent être utilisés en toute sécurité sans l'aide de telles instructions. »

Pour examens médicaux. Mettre les embouts auriculaires dans les oreilles et apposer la membrane sur la partie à écouter. Tourner la tête du stéthoscope pour écouter avec la face petite sans membrane et bague anti-froid (cloche).

#### PRECAUTION D'EMPLOI :

Ce dispositif ne peut être utilisé que par une personne compétente et qualifiée.

Nettoyer la surface utilisée après chaque examen avec un désinfectant approprié pour éviter les contaminations entre patient.

Vérifier que les embouts auriculaires soient propres et non bouchés.

Appareil uni-personnel, éviter de le prêter.

Ne pas écarter les lyres au maximum risque de rupture de celle-ci.