
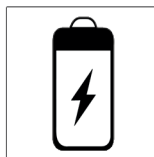
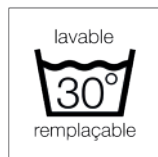


FAUTEUIL RELEVEUR ALTHEA'UP

disponible en 1 ou 2 moteurs

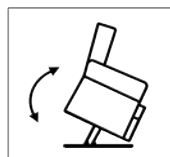

Le fauteuil **ALTHEA 'UP** est un fauteuil releveur électrique ultra confortable, multi-positions et qui facilite l'accès aux soins.

Sa fonction releveur est très appréciée par les personnes qui peinent à se relever, mais qui trouve également dans cette fonction, une aide véritable pour s'asseoir.

Ce fauteuil releveur électrique peut-être équipé d'accoudoirs relevables afin de faciliter les transferts (en option).

L'**ALTHEA'UP** à l'esthétique soignée est un produit Français exclusif sur le marché.

caractéristiques :

hygiène	modules de couettes remplaçables, amovibles et lavables à 30°
modules de couettes	remplacement aisé en cas d'usure
composition de la couette	fibre creuse siliconée
positions	assise, TV, repos, releveur
sécurité	PVC non-feu M1 - tissus chinés non-feu EN 1021.1 & 1021.2 - velours non-feu EN 1021.1
revêtements	velours, PVC, tissus chinés
largeurs d'assise	53 cm
releveur 2 en 1	2 profondeurs au choix 45 ou 55 cm
options disponibles	poignées de préhension, support de téléphone, oreiller de confort, coussin lombaire, accoudoirs relevables, télécommande intégrée avec chargeur USB A et C, pochette latérale, kit batterie, pieds décoratifs, protection de tête, protection de fauteuil
poids maximum utilisateur	160 kg
eco participation	10,38€ (1 et 2 moteurs)
garanties	fauteuil : 2 ans / vérin et mécanique : 5 ans
franco à l'unité	oui
fabrication	France - région grand Est- Aube



FAUTEUIL RELEVEUR ALTHEA'UP

dimensions en cm

modèle ALTHEA'UP	largeur d'assise	profondeurs d'assise	largeur hors tout	hauteur assise	hauteur hors-tout	poids du fauteuil	poids maxi utilisateur
1 moteur	53 cm	45 ou 55 cm	70 cm	55 cm	116 cm	69 kg	160 kg
2 moteurs	53 cm	45 ou 55 cm	70 cm	55 cm	116 cm	71 kg	160 kg

tolérance dimensionnelle et pondérale + 15 mm / 1,5 kg

utilisation de la télécommande

Fauteuil 1 moteur - télécommande 2 boutons



Bouton vert : Inclinaison du fauteuil vers l'arrière avec élévation du repose-jambes
Bouton blanc : Retour du fauteuil en position assise avec abaissement du repose-jambes puis passage en position releveur.

Fauteuil 2 moteurs - télécommande 4 boutons



Bouton vert : Inclinaison du dossier vers l'arrière.
Bouton blanc : Remontée du dossier en position droite.
Bouton bleu : Montée du repose-jambes. Retour du fauteuil en position assise.
Bouton jaune : Abaissement du repose-jambes. Passage en position releveur du fauteuil.

Option télécommande intégrée avec chargeur USB A et C



Bouton avant : retour du fauteuil en position assise avec abaissement du repose-jambes, puis passage en position releveur.
Bouton arrière : inclinaison arrière du fauteuil avec élévation du repose-jambes.

Vérifier systématiquement que rien ne puisse être bloqué ou être dissimulé sous la mécanique avant chaque cycle d'utilisation. La mécanique du fauteuil pourrait provoquer de réelles blessures, soyez très vigilant avec les enfants en bas âge ou les animaux de compagnie.

LES COLORIS



VELOURS
SAPHIR



VELOURS
GALÈNE



PVC
BEIGE
AMANDE



TISSU
GRIS CHINÉ

velours déperlant non-feu
 EN 1021.1 & 1021.2
 - saphir
 - galène

PVC non-feu M1
 - beige amande

tissus chinés non-feu
 EN 1021.1 & 1021.2
 - gris chiné

LES OPTIONS



poignées de préhension



oreiller de confort



coussin lombaire



accoudoirs relevables



télécommande intégrée
avec accès USB A et C



protection de fauteuil



pochette latérale



support téléphone



protection de tête



pieds décoratifs



kit batterie