

PROTECTION HALLUX VALGUS

INDICATIONS :

Le contact de la chaussure sur l'«oignon» est douloureux ? Pour un usage quotidien, l'idéal est d'opter pour la protection hallux valgus qui soulage les douleurs conflictuelles sans générer de pressions supplémentaires.

SPÉCIFICITÉS :

Pour des protections destinées à l'hallux valgus, la finesse est essentielle : porter un produit trop encombrant dans la chaussure peut aggraver la pathologie ou créer des effets indésirables sur d'autres zones du pied. La protection EPITACT® est donc particulièrement fine tout en étant très efficace. Son patronnage a été breveté (peu de volume et de coutures) et le gel d'Epithelium 26® qui évite les frottements sur « l'oignon » a été volontairement limité à 1 mm d'épaisseur.

ERGONOMIE :

Peu encombrante, la protection se porte dans vos chaussures habituelles.

CARACTÉRISTIQUES :

L'EPITHELIUM 26® est une exclusivité EPITACT® :

Ce gel silicone a fait l'objet du brevet «Véritable substitut au capiton plantaire humain». Ses propriétés de répartition des pressions ont été validées grâce à des tests réalisés dans un laboratoire spécialisé.

Son intégration dans des protections contre les pressions excessives est un gage d'efficacité et de confort.

CONSEILS D'UTILISATION :

Si votre gros orteil est encore mobile, nous vous recommandons le port de l'orthèse corrective souple EPITACT® pour votre hallux valgus. Elle limite l'évolution de la déformation, soulage les douleurs articulaires et évite les frottements sur «l'oignon».


CONTRE-INDICATIONS :

Ne pas utiliser sur une plaie non protégée. Cas des personnes souffrant d'artérite, de diabète, de polyneuropathie, de neuropathie des membres inférieurs ou d'ulcères : demander conseil à votre médecin ou à votre podologue, puis surveiller votre pied pendant l'utilisation.

COMPOSITION : Gel de silicone, Tissu polyamide élasthanne.

ENTRETIEN :

Lavable en machine à 30°C. Laisser sécher naturellement.

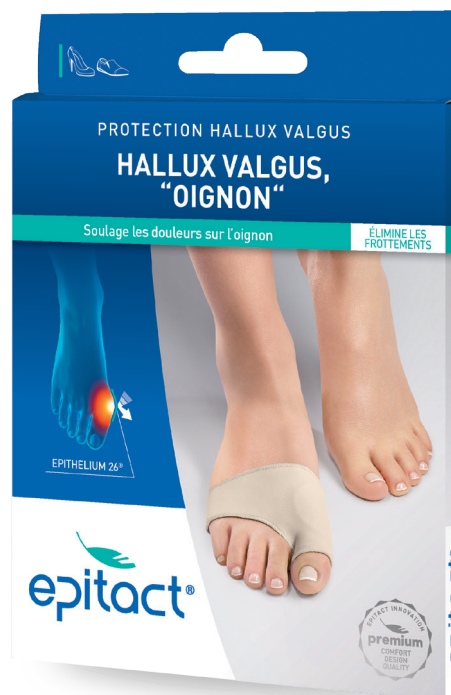

DISPONIBLE EN 3 TAILLES :

Vendue à l'unité. (Si vous hésitez entre 2 tailles, choisissez la plus petite)			
POINTURES	S 36-38	M 39-41	L 42-45
RÉFÉRENCES	HV2611DI	HV2612DI	HV2613DI

La protection hallux valgus peut être portée indifféremment sur le pied droit ou le pied gauche.