



Semelles Invisibles JAMBES LÉGÈRES

INSUFFISANCE VEINEUSE - JAMBES LOURDES

INDICATIONS : Le port des Semelles invisibles JAMBES LÉGÈRES EPITACT® est préconisé en cas de troubles de la circulation sanguine des membres inférieurs, d'insuffisance veineuse, de varices débutantes.

SEMELLES THÉRAPEUTIQUES : Grâce à leur réseau de billes de gel unique qui active la pompe plantaire à chaque pas, elles améliorent l'efficacité du retour veineux et soulagent vos jambes lourdes.


CONÇUES POUR S'ADAPTER À VOS TENUES D'ÉTÉ : Invisibles et repositionnables, elles s'adaptent à vos chaussures ouvertes jusqu'à 5 cm de talon, pour vous accompagner tout l'été !

CONFORT & EFFICACITÉ

SOULAGENT LES JAMBES
LOURDES ET GONFLÉES.

BONNE TENUE LORS DE LA
MARCHÉ.

INVISIBLES DANS VOS
CHAUSSURES OUVERTES.

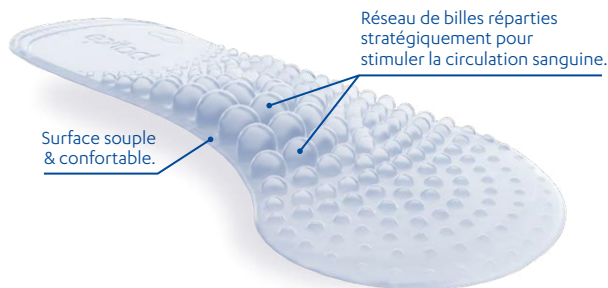

UTILISATION ET ENTRETIEN : Si besoin, adaptez les semelles à votre pointure en les découpant au talon. Retirez le film transparent sous les semelles. Collez-les en positionnant le talon à l'arrière de la chaussure. Si elles commencent à se décoller, retirez-les très doucement et rincez-les à l'eau **sans savon**. Une fois sèches, elles retrouvent leur adhésivité et vous pouvez les replacer. Si des signes d'usure (déchirures) apparaissent, remplacez les semelles.

Ne pas utiliser avec ou à la place de vos semelles orthopédiques ou dans des chaussures avec une semelle de forme anatomique. Compatibles mais non substituables aux traitements médicamenteux et/ou aux dispositifs de compression médicale.

DURÉE DE VIE MINIMUM : 6 mois. Lavage en moyenne tous les 3,5 jours.

CONTRE-INDICATIONS : Ne pas utiliser sur une lésion cutanée (plaie). Cas des personnes souffrant d'artérite, de phlébite, de diabète, de neuropathie des membres inférieurs ou d'allergie à l'un des composants : demandez conseil à un professionnel de santé, puis surveillez votre pied pendant l'utilisation.

En cas de douleurs ou de réaction inhabituelle, contactez votre médecin. Tout incident grave lié à ce produit doit être déclaré au laboratoire Millet Innovation et à l'Agence Nationale des Produits de Santé (ANSM).

COMPOSITION : PU 96,4% ; PET 3,6%.

POINTURES	RÉF.	EAN	ACL
36 - 38	SE020	3660396019788	6412806
39 - 41	SE021	3660396019795	6412807