

## FICHE TECHNIQUE

## TRCANNABIS

Test rapide de dépistage qualitatif de la Marijuana dans la salive

CODE ARTICLE : 18450

DATE D'EDITION : 30/10/2024 07:38:57



Photo non contractuelle

## INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

### Référence

TRCANNABIS

### Désignation

Test rapide de dépistage qualitatif de la Marijuana dans la salive

### Application

Dépistage qualitatif de la Marijuana dans la salive

### Réglementation

Directive 98/79/CEE Dispositifs médicaux de diagnostic in vitro

## FICHE TECHNIQUE

## TRCANNABIS

Test rapide de dépistage qualitatif de la Marijuana dans la salive

CODE ARTICLE : 18450

DATE D'EDITION : 30/10/2024 07:38:57

### Conditionnement

Carton (nombre de pièces)	0
Minimum de vente (nombre de pièces)	25

### Descriptif du produit

Type d'échantillons	Salive
Temps d'analyse (en min)	5
Sensibilité	96.4%
Spécificité	95.2%
Exactitude	95.6%
Limite de détection	50ng/ml
Composition du test	- 25 cassettes de test - 25 collecteurs - 25 tubes de collecte - 25 sceaux de sécurité - 1 notice d'accompagnement

## FICHE TECHNIQUE

## TRCANNABIS

Test rapide de dépistage qualitatif de la Marijuana dans la salive

CODE ARTICLE : 18450

DATE D'EDITION : 30/10/2024 07:38:57

### Mode opératoire du test

#### 1.Extraction de l'échantillon

Sortez le collecteur de fluide oral de sa pochette scellée et insérez l'extrémité de l'éponge dans la bouche. Essayez activement l'intérieur de la bouche pendant au moins 3 minutes l'intérieur de la bouche pour recueillir le liquide buccal jusqu'à ce que l'éponge soit complètement saturée. Pressez doucement l'éponge entre la langue et les dents pour faciliter la saturation. Aucun point dur ne doit être perçu sur l'éponge lorsqu'elle est saturée. Remarque : la saturation complète de l'éponge est très importante pour obtenir suffisamment de liquide buccal pour le traitement. Dans le cas contraire, des résultats erronés ou non valides peuvent être observés.

Retirer la chambre à fluide oral de la pochette scellée et la faire dévisser. Retirez le collecteur saturé de liquide buccal

de la bouche et placez-le dans la chambre de collecte. Appuyer complètement l'éponge sur la crépine pour libérer le liquide buccal jusqu'au niveau du point fléché, puis visser la chambre de collecte jusqu'au niveau du point fléché, puis revissez-le fermement. Jeter le collecteur.

#### 2. Réaction au test

Sortir la cassette de test de son sachet scellé et la placer sur une surface propre et plane.

Agiter à nouveau doucement la chambre de collecte pendant 10 secondes et ouvrir l'embout, l'inverser et transférer 3 gouttes d'échantillon à tester (environ 120 µl) dans le puits d'échantillon de la cassette de test. Démarrez le chronomètre.

Attendre l'apparition de la (des) ligne(s) colorée(s).

Lire les résultats au bout de 5 minutes. Ne pas lire les résultats après 15 minutes.

Appliquez le sceau de sécurité sur le bouchon à vis des chambres de collecte et envoyez le tout au laboratoire pour confirmation si nécessaire.

## FICHE TECHNIQUE

## TRCANNABIS

Test rapide de dépistage qualitatif de la Marijuana dans la salive

CODE ARTICLE : 18450

DATE D'EDITION : 30/10/2024 07:38:57

### Lecture du test

**NÉGATIF:** \*Deux lignes colorées apparaissent. Une ligne colorée doit se trouver dans la région de contrôle (C), et une autre ligne colorée doit se trouver dans la région de test (T). Ce résultat négatif indique que la concentration de Marijuana est inférieure au niveau détectable de 50ng/mL.

\*NOTE: L'intensité de la couleur dans la région de la ligne de test (T) peut varier en fonction de la concentration d' 9-THC (THC Prototype) présente dans l'échantillon. Par conséquent, toute nuance de couleur dans la région de la ligne de test (T) doit être considérée comme négative.

**POSITIF:** Une ligne colorée apparaît dans la région de contrôle (C). Aucune ligne colorée n'apparaît dans la région de test (T). Ce résultat positif indique que la concentration de Marijuana est supérieure au niveau détectable de 50 ng/mL.

**INVALIDE:** La ligne de contrôle n'apparaît pas. Un volume d'échantillon insuffisant ou des techniques procédurales incorrectes sont les raisons les plus probables de l'échec de la ligne de contrôle. Revoyez la procédure et répétez le test avec une nouvelle épreuve. Si le problème persiste, cessez immédiatement d'utiliser la cassette de test et contactez votre distributeur local.

### CONTROLE DE QUALITE

Un contrôle de procédure est inclus dans le test. Une ligne colorée apparaissant dans la zone de contrôle (C) est considérée comme un contrôle procédural interne. Cela confirme que le volume de l'échantillon est suffisant, que l'effet de mèche de la membrane est adéquat et que la technique procédurale est correcte. Les standards de contrôle ne sont pas fournis avec ce kit; cependant, il est recommandé de tester des contrôles positifs et négatifs comme bonne pratique de laboratoire pour confirmer la procédure de test et vérifier la bonne performance du test.

### Température de conservation

Entre 2 et 30°C

## FICHE TECHNIQUE

## TRCANNABIS

Test rapide de dépistage qualitatif de la Marijuana dans la salive

CODE ARTICLE : 18450

DATE D'EDITION : 30/10/2024 07:38:57

### Traçabilité

Présence d'un numéro de lot	Oui
Présence d'une date de péremption	Oui
Durée de vie (en mois)	24

### INFORMATIONS SUR LA PRODUCTION

<b>Nom du fabricant</b>	ALLTEST
<b>Référence du fabricant</b>	DTH-P802
<b>Pays d'origine</b>	CHINE