

FICHE TECHNIQUE

TRDROG5PS

Test rapide pour la détection de drogues, 5 paramètres, dans la salive : THC (seuil 15ng/ml) AMP (seuil 50ng/ml) OPI (seuil 40ng/ml) COC (20ng/ml) MET/MDMA (seuil 50ng/ml)

CODE ARTICLE : 18468

DATE D'EDITION : 08/11/2024 13:44:14



Photo non contractuelle

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Référence

TRDROG5PS

Désignation

Test rapide pour la détection de drogues, 5 paramètres, dans la salive : THC (seuil 15ng/ml) AMP (seuil 50ng/ml) OPI (seuil 40ng/ml) COC (20ng/ml) MET/MDMA (seuil 50ng/ml)

FICHE TECHNIQUE

TRDROG5PS

Test rapide pour la détection de drogues, 5 paramètres, dans la salive : THC (seuil 15ng/ml) AMP (seuil 50ng/ml) OPI (seuil 40ng/ml) COC (20ng/ml) MET/MDMA (seuil 50ng/ml)

CODE ARTICLE : 18468

DATE D'EDITION : 08/11/2024 13:44:14

Application

Test rapide de détection de drogues

Réglementation

Directive 98/79/CEE Dispositifs médicaux de diagnostic in vitro

Conditionnement

Carton (nombre de pièces) 0

Minimum de vente (nombre de pièces) 25

Descriptif du produit

Type d'échantillons	Salive
Temps d'analyse (en min)	5
Limite de détection	THC (seuil 15ng/ml) AMP (seuil 50ng/ml) OPI (seuil 40ng/ml) COC (20ng/ml) MET/MDMA (seuil 50ng/ml)
Composition du test	- 25 cassettes d'essai - 25 collecteurs - 25 tubes de collecte - 25 sceaux de sécurité - 1 notice

FICHE TECHNIQUE

TRDROG5PS

Test rapide pour la détection de drogues, 5 paramètres, dans la salive : THC (seuil 15ng/ml) AMP (seuil 50ng/ml) OPI (seuil 40ng/ml) COC (20ng/ml) MET/MDMA (seuil 50ng/ml)

CODE ARTICLE : 18468

DATE D'EDITION : 08/11/2024 13:44:14

Mode opératoire du test

1. Extraction d'échantillon

① Retirez le collecteur de liquide buccal de la pochette scellée et insérez l'extrémité de l'éponge dans la bouche. Tamponnez activement l'intérieur de la bouche pendant au moins 3 minutes pour recueillir le liquide buccal jusqu'à ce que l'éponge soit complètement saturée. Appuyez doucement sur l'éponge entre la langue et les dents pour aider à la saturation. Aucun point dur ne doit être ressenti sur l'éponge lorsqu'elle est saturée.

Remarque : la saturation complète de l'éponge est très importante pour obtenir suffisamment de liquide buccal pour le traitement. Sinon, des résultats faux ou non valides peuvent être observés.

② Retirez la chambre de collecte de la pochette scellée et dévissez-la. Retirez le collecteur saturé de liquide buccal de la bouche et placez-le dans la chambre de collecte. Appuyez complètement l'éponge contre le filtre pour libérer le liquide buccal jusqu'au niveau de la pointe de la flèche, puis revissez-la fermement. Jetez le collecteur.

③ Agitez doucement la chambre de collecte pendant 10 secondes, puis laissez-la pendant 10 minutes.

2. Réalisation du test

④ Retirez la cassette de test de la pochette scellée, placez-la sur une surface propre et plane.

⑤ Agitez à nouveau doucement la chambre de collecte pendant 10 secondes et ouvrez l'embout, retournez-le puis transférez 3 gouttes d'échantillon de liquide buccal (environ 120 µL) dans le puits d'échantillon (S) de la cassette de test. Démarrez le chronomètre.

⑥ Attendez que la ou les lignes colorées apparaissent. Lisez les résultats au bout de 5 minutes. Ne lisez pas les résultats après 15 minutes.

⑦ Appliquez un sceau de sécurité sur le bouchon à vis de la chambre de collecte et envoyez-le au laboratoire pour confirmation si nécessaire.

FICHE TECHNIQUE

TRDROG5PS

Test rapide pour la détection de drogues, 5 paramètres, dans la salive : THC (seuil 15ng/ml) AMP (seuil 50ng/ml) OPI (seuil 40ng/ml) COC (20ng/ml) MET/MDMA (seuil 50ng/ml)

CODE ARTICLE : 18468

DATE D'EDITION : 08/11/2024 13:44:14

Lecture du test

NÉGATIF : * Deux lignes apparaissent. Une ligne colorée doit se trouver dans la zone de contrôle (C) et une autre ligne colorée apparente adjacente doit se trouver dans la zone de test (drogue/T). Ce résultat négatif indique que la concentration de drogue est inférieure au niveau détectable.

*REMARQUE : La nuance de couleur dans la zone de la ligne de test (drogue/T) varie, mais elle doit être considérée comme négative dès qu'il y a même une ligne faible.

POSITIF : Une ligne colorée apparaît dans la zone de contrôle (C). Aucune ligne n'apparaît dans la zone de test (drogue/T). Ce résultat positif indique que la concentration de drogue est supérieure au niveau détectable.

INVALIDE : La ligne de contrôle n'apparaît pas. Un volume d'échantillon insuffisant ou des techniques de procédure incorrectes sont les raisons les plus probables de l'échec de la ligne de contrôle. Revoyez la procédure et répétez le test en utilisant une nouvelle cassette de test. Si le problème persiste, arrêtez immédiatement d'utiliser le lot et contactez le fabricant

Température de conservation

Entre 2 et 30°C

Traçabilité

Présence d'un numéro de lot	Oui
Présence d'une date de péremption	Oui
Durée de vie (en mois)	24

INFORMATIONS SUR LA PRODUCTION

FICHE TECHNIQUE

TRDROG5PS

Test rapide pour la détection de drogues, 5 paramètres, dans la salive : THC (seuil 15ng/ml) AMP (seuil 50ng/ml) OPI (seuil 40ng/ml) COC (20ng/ml) MET/MDMA (seuil 50ng/ml)

CODE ARTICLE : 18468

DATE D'EDITION : 08/11/2024 13:44:14

Nom du fabricant

ALLTEST

Référence du fabricant

DSD-855

Pays d'origine

CHINE