Mode d'emploi

MNPG94 Rev. 00 Edition 25/06/2012

MIO-VEIN

ATTENTION: MIO-VEIN EST UN DISPOSITIF MEDICAL.

En présence d'un quelconque problème de santé utiliser MIO-VEIN uniquement après avoir consulté votre médecin.



Lire attentivement le mode d'emploi et consulter la position des électrodes avant d'utiliser MIO-VEIN. Lire attentivement les contre-indications et les précautions d'emploi.



C € 0476 Produit conforme à la directive 93/42/CEE (et successives modifications 2007/47/EC) sur les applications de type médical.

IACER S.r.I. via Pertini 24/A, 30030 Martellago (Venezia): iacer@iacer.it



SOMMAIRE

SOMMAIRE 2
1. CONTENU DU KIT MIO-VEIN3
2. DESTINATION ET CONTEXTE D'UTILISATION3
3. AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS D'UTILISATION 3
4. ÉTIQUETAGE 5
5. SYMBOLES 6
6. GUIDE D'UTILISATION DE MIO-VEIN7
7. INSTALLATION ET RECHARGEMENT DE LA BATTERIE 10
8. MANUTENTION ET CONSERVATION DE MIO-VEIN 11
9. RÉSOLUTION DES PROBLÈMES ET RÉPONSES AUX DEMANDES. 12
10. STIMULATION DE LA POMPE VEINEUSE13
11. POSITION DES ÉLECTRODES ET INTENSITÉ DE STIMULATION. 14
12. ÉLECTRODES ADHÉSIVES15
13. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES15
14. GARANTIE 16



1. Contenu du kit MIO-VEIN.



2. Destination et contexte d'utilisation.

L'électrostimulateur MIO-VEIN est un dispositif médical dont l'utilisation est particulièrement indiquée pour l'usage domestique par des personnes adultes, informées de manière appropriée grâce à la lecture du mode d'emploi.

L'utilisation de MIO-VEIN permet de transférer au corps humain des micro-impulsions électriques capables stimuler la musculature du mollet et par conséquent favorise la circulation veineuse.

Contre-indications.

L'utilisation est interdite aux porteurs de pacemaker, aux cardiopathes, aux épileptiques, aux personnes souffrant de phlébites, d'états fébriles, de thrombophlébites, aux personnes anxieuses et en présence de maladies graves, hernies abdominales ou inguinales, en présence de lésions graves.

En présence de traumatismes, de stress musculaire ou de tout autre problème de santé, utiliser le produit uniquement après avoir consulté votre médecin et sous contrôle médical.

Effets secondaires.

Il n'existe pas d'effets secondaires significatifs. Dans certains cas, chez des personnes particulièrement sensibles, des rougeurs cutanées peuvent se manifester au niveau des électrodes après le traitement : les rougeurs disparaissent normalement quelques minutes après le traitement. Si elles persistent consulter un médecin.

Dans de rares cas la stimulation du soir provoque un retard d'endormissement. En ce cas suspendre immédiatement le traitement et consulter un médecin.

3. Avertissements et précautions d'utilisation.

MIO-VEIN a été conçu et réalisé pour fonctionner uniquement avec la batterie interne Ni-Mh rechargeable de 800mAh.

- Il est interdit d'utiliser le dispositif en présence d'appareils de surveillance des patients.
- Ne pas utiliser MIO-VEIN avec des appareils d'électrochirurgie ou de thérapie à ondes courtes ou à micro-ondes ou des appareils qui envoient des impulsions électriques dans le corps.

I.A.C.E.R. Srl 3 MNPG94-00



- L'utilisation est interdite aux personnes privées de leur entendement et de leur volonté, aux personnes qui souffrent de troubles de la sensibilité, aux personnes inaptes si elles ne sont pas assistées par un personnel qualifié (par ex. médecin ou thérapeute).
- L'utilisation est interdite aux personnes de moins de 15 ans ou de toute façon pas adéquatement éclairées sur l'utilisation du dispositif par un personne adulte.
- L'utilisation du dispositif est interdite en présence de signes de détérioration du dispositif même, des électrodes et des câbles. Contrôler l'intégrité avant chaque utilisation.

En cas de pénétration de substances étrangères dans le dispositif, contacter immédiatement le revendeur ou le fabricant.

En cas de chute, vérifier que le conteneur ne présente pas de fissures ni de lésions de quelque nature que ce soit ; si c'est le cas, contacter le revendeur ou le fabricant.

En cas de variation des prestations au cours du traitement, suspendre immédiatement celui-ci et contacter immédiatement le revendeur ou le fabricant.

- L'utilisation du dispositif est interdite en association avec d'autres dispositifs médicaux.
- L'utilisation du dispositif est interdite à proximité de substances inflammables/gas/explosives ou dans des milieux présentant de fortes concentrations d'oxygène, en présence des dispositifs pour aérosolthérapie ou dans des milieux très humides (ne pas utiliser dans une salle de bain ou pendant la douche/bain).
- En cas de dispositifs métalliques d'ostéosynthèse, consulter un médecin avant l'utilisation de MIO-VEIN.

En cas de stimulations musculaires prolongées, il est possible de ressentir une sensation de lourdeur musculaire et de crampes. Dans ce cas il convient de suspendre les traitements avec MIO-VEIN.

- Il est interdit de placer les électrodes de manière à ce que le flux de courant traverse la zone cardiaque (par ex. : une électrode noire sur la poitrine et une électrode rouge sur les omoplates).
- Il est interdit d'utiliser le dispositif avec des électrodes placées sur ou à proximité de lésions ou de déchirures cutanées.
- Il est interdit de placer les électrodes sur le sinus carotidien (carotides) et les parties génitales.
- Il est interdit de placer les électrodes à proximité des yeux; ne pas recouvrir le bulbe oculaire avec le courant engendré (les électrodes diamétralement opposées par rapport à l'œil), maintenir une distance minimale de 3 cm du globe oculaire.
- Pour l'utilisation des électrodes suivre les indications figurant dans le présent mode d'emploi et sur l'emballage des électrodes. Utiliser des électrodes monopatient, fournies exclusivement par le fabricant ou par le revendeur, et éviter soigneusement l'échange d'électrodes entre utilisateurs différents. MIO-VEIN est testé et garanti pour l'utilisation avec les électrodes fournies.
- Des électrodes de section inadaptée (trop petites) peuvent provoquer des réactions cutanées ou des brûlures.
- Ne pas utiliser les électrodes si elles sont endommagées, même si elles adhèrent bien à la peau.
- Utiliser seulement des électrodes sur la peau nette et sèche.
- Il est interdit d'utiliser l'électrode quand il n'adhère plus sur la peau.
- Faire attention à l'utilisation des câbles de connexion avec les enfants: danger d'étranglement
- Maintenir une distance de sécurité entre les électrodes: le contact entre les électrodes pourraient causer une stimulation inadéquate ou des irritations/ brulures.

En cas de doute sur l'utilisation correcte du dispositif consultez votre médecin.


I.A.C.E.R. Srl 4 MNPG94-00



- Le dispositif est indiqué pour une utilisation domiciliaire.
- Faire attention dans le patients avec des suspections des problèmes cardiaques.
- L'intensité du stimulation et la position des électrodes devraient respecter les préscriptions du médecin.
- La bonté du traitement dépend principalement de la sélection des patients propre au traitement par du personnel qualifié.
- Diminuer l'intensité de stimulation si le traitement résulte inadéquate ou inconfortable.
 Consulter le médecin si le problème persiste.
- Ne pas utiliser le dispositif pendant la conduite des véhicules ou pendant la conduite et le contrôle des appareils/machines.
- Ne pas mélanger les câbles de connexion avec les câbles des écouteurs et ne pas connecter les câbles aux autres appareils.
- Ne pas utiliser des objets pointus ou tranchants sur le clavier du dispositif.
- Utiliser seulement les accessoires fournis par le fabricant.

Attention: le dispositif engendre un courant supérieur à 10 mA.

4. Étiquetage

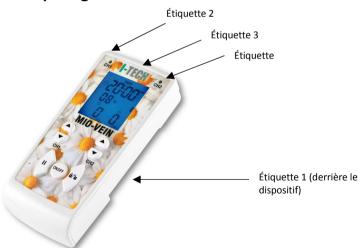

I.A.C.E.R. Srl 5 MNPG94-00



Explications de l'étiquetage

Étiquette 1.




Étiquette 2.



Étiquette 3.



Étiquette 4.

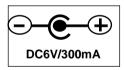


5. Symboles

	Mode d'emploi
C € 0476	Produit conforme à la Directive de la Communauté Européenne 93/42/EEC
★	Type BF
	Attention
X	Dispositif soumis au recyclage des déchets électroniques (Directive DEEE)
LOT	Donnée de fabrication (mois/an)

Vie utile du dispositif : 5 ans.



6. Guide d'utilisation de Mio-Vein.

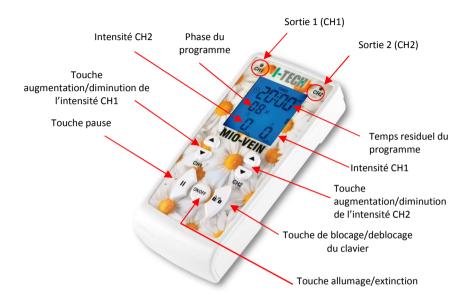

Conseils préliminaires.

Avant d'utiliser MIO-VEIN nettoyer la peau à proximité de la zone à traiter ; relier les fiches des câbles d'électrostimulation aux électrodes adhésives ; placer les électrodes adhésives sur la peau (voir le chapitre 11 Placement des éléctrodes et intensité) ; relier les câbles de transmission des impulsions aux fiches correspondantes (canal 1 et/ou canal 2), puis mettre sous tension MIO-VEIN.

Attention: à la fin du traitement, avant de déconnecter les électrodes, s'assurer que MIO-VEIN est hors tension.

Instructions de fonctionnement. (Remarque : lire entièrement le mode d'emploi avant l'utilisation)

- 1. Mettre MIO-VEIN sous tension à l'aide du bouton ON/OFF.
- 2.L'écran affiche en haute la durée du programme (20 minutes), dans la partie centrale à gauche le numéro des traitement exécutés et à la droite l'icone de la batterie.

I.A.C.E.R. Srl 7 MNPG94-00





- 3. Verifier l'état de charge de la batterie: suivre les instructions du chapitre Rechargement de la batterie.
- 4. Pour commencer la séance de travail, appuyer sur la touche des canaux correspondants et augmenter l'intensité de courant à la sortie; l'indicateur commencera à clignoter.



- 5.L'écran affiche le temps restant et il sera possible d'augmenter l'intensité pendant le traitement en appuyant sur la touche des canaux correspondants jusqu'à atteindre le niveau de tolérance personnelle (confort de stimulation). Si l'intensité est trop forte, il est possible de réduire la puissance à l'aide de la touche.
- 6. Quand l'intensité arrive à 7mA l'écran affichera la bar de l'intensité croissante par chaque canal. L'intensité maximale est de 60mA, avec un pas de 1mA.





- 7.Le programme est divisé en deux phases : le passage d'une phase à l'autre est indiqué par un signal sonore. L'écran affichera dans la partie centrale le numéro du phase courante (01 ou 02).
- 8.Un signal sonore indique la fin de la thérapie et l'écran initial du programme sera affiché avec l'intensité mise à zero.
- 9.Il est possible de mettre en pause l'appareil à tout moment en pressant sur la touche : l'icône clignotant □ en haute à droite sera affiché. Pour rédemarrer, presser à nouveau la touche ■
- 10. Éteindre le dispositif MIO-VEIN en appuyant sur la touche **ON/OFF**.

ATTENTION: Si aucune opération n'est effectuée pendant une durée supérieure a 2 minutes, MIO-VEIN s'éteint automatiquement afin de préserver les batteries.

Blocage du clavier

Le dispositif est équipé de la fonction de blocage du clavier pour éviter des modifications accidentelles aux paramètres réglés pendant la séance de thérapie.

- Le blocage du clavier est activé automatiquement 20 secondes après le debut de la thérapie: l'écran affichera en haute à gauche l'icone clignotant O et le clavier sera bloquée.
- Pour débloquer le clavier, appuyer sur la touche et l'icone du blocage disparait de l'affichage.

ATTENTION: MIO-VEIN est équipé d'un système de sécurité qui reconnait une connexion correcte des câbles et des électrodes, c'est-à-dire une transmission correcte du courant au patient. En cas de connexion incorrecte il n'est pas possible de dépasser l'intensité de 9 mA: le dispositif arrête la transmission du courant et l'affichage visualisera l'écran du début de traitement.

Vérifier l'état des câbles, des électrodes, (éventuellement les remplacer), et si la connexion au patient est correcte. Si le problème persiste, contacter le fabricant.

I.A.C.E.R. Srl 9 MNPG94-00



Le dispositif est doté de la fonction de mémorisation des traitements exécutés.

Le numéro des traitements exécutés est affiché sur l'écran au début de chaque traitement pendant le stand by du dispositif.

Si le traitement est arrêté avant la fin du programme, le traitement ne sera pas compté et il ne sera pas mémorisé.

Le numéro maximale des traitement qui peuvent être exécuter est 99 : au-dessus de ce numéro la mémoire sera remise à zéro et la compte recommence de 1.

7. Installation et rechargement de la batterie.

Installation de la batterie.

Ouvrir le couvercle de batterie situe à l'arrière de l'appareil, connecter le câble de la batterie à la prise à l'intérieur du cage des batteries.

Insérer la batterie dans le cage des batteries et fermer le couvercle.

Attention: Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période (plus de 2 mois) , enlever les batteries.

Les batteries doivent être manipulés par des personnels adultes : conserver hors de la portée des enfants.

Le dispositif MIO-VEIN est doté d'une batterie Ni-Mh rechargeable de 800mAh avec une nouvelle technologie long durée (long-lasting).

L'écran affichera l'indication du niveau de la batterie:



Pour recharger le dispositif suivre les pas ci-dessous:

- S'assurer que le dispositif soit étendu.
- S'assurer que le dispositif ne soit pas connecté au patient (câbles et électrodes déconnectés).
- Insérer la fiche du chargeur sur la partie supérieure de l'électrostimulateur et brancher la prise du chargeur au réseau électrique. L'écran affichera à la droite l'icône clignotant qui se réfère au niveau de la batterie.

Pour maintenir le plein rendement de la batterie, recharger le dispositif pour 6/8 heures. Déconnecter le chargeur de la prise du courant et du dispositif à la fin de la recharge. Ne pas plonger la batterie dans l'eau ni dans d'autres liquides et ne pas l'exposer à des sources de chaleur.

Ne pas jeter de vieilles batteries ni de batteries défectueuses avec les déchets ménagers, utiliser les conteneurs appropriés pour l'élimination des déchets.

I.A.C.E.R. Srl 10 MNPG94-00



ATTENTION: Ne laisser la batterie complètement déchargée pour longs périodes. Nous recommandons d'effectuer un cycle de chargement complet (6/8 heures) une fois par mois.

Il est conseillé de décharger les batteries le plus possible avant d'effectuer un nouveau rechargement au fin de préserver la batterie.

ATTENTION: Après la première recharge, la batterie peut présenter an capacité limité : est une normal caractéristique de la batterie Ni-Mh. Recharger la batterie après chaque traitement pour les premières 3/4 fois.

Ne pas utiliser le chargeur si :

- La prise est endommagée ou si des parties sont cassées ;
- Il a été exposé à la pluie ou à tout autre liquide ;
- Les composants ont subi des dommages lors d'une chute.

Ne pas plonger le chargeur dans l'eau. Pour nettoyer le chargeur, utiliser un chiffon sec. Ne pas ouvrir le chargeur : il ne contient pas d'éléments réparables.

8. Manutention et conservation de MIO-VEIN.

Il est conseillé de mettre hors tension MIO-VEIN à la fin de chaque séance, et de retirer les câbles des prises appropriées. MIO-VEIN devra être conservé à l'intérieur du sac spécialement fourni, avec tous les éléments dont il est équipé, et rangé avec soin dans un endroit sûr et hors des situations énumérées au paragraphe *Avertissements*.

MIO-VEIN doit être conservé dans les conditions suivantes:

Sans le coffret fourni:

Température de +5 à + 40 °C Humidité relative de 30 à 85% Pression atmosphérique de 700 à 1060 hPa

Avec le coffret fourni:

Température de -10 à +50 °C Humidité relative de 10 à 90% Pression atmosphérique de 700 à 1060 hPa

Nettoyage: pour nettoyer le dispositif utiliser exclusivement un chiffon sec.

Il est conseillé d'effectuer un contrôle du fonctionnement du dispositif tous les 24 mois auprès du fabricant.

Le fabricant considère que le dispositif MIO-VEIN ne peut pas être réparé par un personnel extérieur à l'entreprise. Toute intervention dans ce sens de la part d'un personnel non autorisé par le fabricant sera considérée comme une altération du dispositif, relevant ainsi le constructeur de la garantie et des dangers auxquels peut être exposé l'opérateur ou l'utilisateur.

Remarque: avant de replacer l'électrostimulateur dans son sac, déconnecter les câbles. Dans le cas contraire, les câbles subissent une trop grande torsion au niveau des prises. Cela peut endommager les câbles.

I.A.C.E.R. Srl 11 MNPG94-00



9. Résolution des problèmes et réponses aux demandes.

Toute intervention quelle qu'elle soit sur MIO-VEIN devra être effectuée uniquement par le fabricant ou par le revendeur agréé. Dans tous les cas, avant d'expédier MIO-VEIN au constructeur il sera nécessaire de s'assurer du mauvais fonctionnement réel de MIO-VEIN. Quelques situations typiques sont énumérées ci-dessous :

MIO-VEIN ne s'allume pas :

- Recharger les batteries puis essayer à nouveau d'allumer l'appareil; s'il ne s'allume toujours pas, vérifier que la prise de courant utilisée fonctionne.
- Vérifier que la touche ON/OFF est bien enclenchée (appuyer au moins une seconde).

MIO-VEIN ne transmet pas d'impulsions électriques :

- S'assurer que les fiches des câbles sont bien branchées aux électrodes et que le plastique de protection de l'électrode a bien été retiré.
- S'assurer que les câbles sont bien connectés (connecteur bien inséré dans l'appareil).
- Vérifier l'état des électrodes: des électrodes endommagées ou de mauvaise qualité ne peuvent pas transmettre les impulsions de façon correcte. Remplacer les électrodes si nécessaire.

MIO-VEIN s'éteint pendant le fonctionnement:

• Il est conseillé de remplacer les batteries (voir le chapitre 7) et de recommencer le traitement. Si le problème persiste contacter le fabricant

ATTENTION: MIO-VEIN est équipé d'un système de sécurité qui reconnait une connexion correcte des câbles et des électrodes, c'est-à-dire une transmission correcte du courant au patient. En cas de connexion incorrecte il n'est pas possible de dépasser l'intensité de 9 mA: le dispositif arrête la transmission du courant et l'affichage visualisera l'écran du début de traitement.

Vérifier l'état des câbles, des électrodes, (éventuellement les remplacer), et si la connexion au patient est correcte. Si le problème persiste, contacter le fabricant.

Elimination des déchets

Pour la sauvegarde de l'environnement, le dispositif, les accessoires et surtout les batteries doivent être éliminés conformément aux normes légales, dans des zones spécialement équipées ou traités avec les déchets spéciaux.

Produit soumis à la norme WEEE relative au tri des déchets : pour l'élimination du produit, utiliser les centres prévus pour la collecte de matériel électronique ou contacter le fabricant.

I.A.C.E.R. Srl 12 MNPG94-00



10. Stimulation de la pompe veineuse.


L'électrostimulation consiste à transmettre au corps humain des micro-impulsions électriques. Les champs d'application de l'électrostimulation sont nombreux : la thérapie de la douleur, la stimulation musculaire et les traitements esthétiques.

Pour chacune de ces applications, des impulsions électriques spécifiques sont utilisées.

MIO-VEIN est un dispositif pour l'électrostimulation qui agit en profondeur sur le muscles du mollet.

Son stimulation active la pompe musculaire du mollet qui est le responsable de plus partie du retour veineux

La contraction des muscles du mollet favorise la compression des veines superficielles et profondes et par conséquent ils favorisent la poussée du sang vers le cœur.

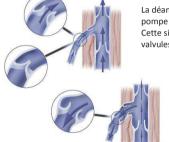

La déambulation favorise le retour veineux grâce à la pompe musculaire qui pousse le sang vers le cœur. Cette situation se vérifie quand les veines ont des valvules et des parois saines.

> Quand les parois s'effondrent et les valvules ne tiennent plus, le sang ralentit et stagne (stase veineuse) pour aller jusqu'à l'inversion de la circulation sanguine.

MIO-VEIN est indiqué pour le traitement des maladies veineuses ou dans les situations potentiellement à risque pour l'apparition des troubles veineux.

Voici les applications les plus fréquentes:

- Stase veineuse
- Œdèmes des membres inférieures
- Veines variqueuses
- Syndrome post phlébitique
- Syndrome post thrombotique
- Troubles veineux pendant la grossesse
- Ulcères veineuse
- Démangeaison après l'utilisation des bas élastiques

MIO-VEIN favorise une circulation veineuse correcte et par conséquent favorise la santé et la beauté des jambes.

I.A.C.E.R. Srl 13 MNPG94-00



11. Position des électrodes et intensité de stimulation.

ATTENTION

Nous rappelons la grande capacité de l'électrostimulateur comme instrument antalgique et la fonction de la douleur comme indicateur de pathologies de plusieurs genres!

Il est recommandé de lire attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser MIO-VEIN.

L'intensité de la stimulation est affichée sur l'écran de MIO-VEIN, pour chaque canal avec une échelle croissante de 0 à 60 et avec un 'indicateur à barres. Si on augmente l'intensité de stimulation le numéro des barres affichés à coté du valeur numérique augmente.

Il est conseillé de positionner les électrodes ovales dans chaque mollet en position assise ou étendue. Puis on doit régler l'intensité de stimulation jusqu'à obtenir une contraction musculaire légère.

Voir les images suivantes pour la position correcte des électrodes.







12. Électrodes adhésives.

Pour placer les électrodes, consulter le manuel de position des électrodes.

Les électrodes fournies par le fabricant sont de première qualité, elles sont préréglées et prêtes à être utilisées. Elles sont particulièrement indiquées pour les traitements d'électrostimulation.

Leur grande flexibilité permet de les placer facilement pour le traitement des diverses zones. Pour les utiliser, retirer l'électrode du plastique spécial qui la protège, la placer sur la peau comme indiqué dans le mode d'emploi et. après utilisation. la rattacher au plastique.

La durée d'une électrode est déterminée par le pH de la peau ; il est toutefois conseillé de ne pas dépasser les 20/30 applications avec la même électrode.

Une utilisation répétée des mêmes électrodes peut compromettre la sécurité de la stimulation, pour cette raison leur utilisation est interdite quand l'électrode n'adhère plus à la peau ; cela peut entraîner en effet un rougissement cutané qui persiste quelques heures après la fin de la stimulation. Dans ce cas consulter un médecin.

Pour un emploi correct, voir dans tous les cas les indications sur la boîte des électrodes et le paragraphe Avertissements.

13. Caractéristiques techniques.

Classe de risque: Ila conformément à la directive 93/42/CEE (et modifications

successives Dir. 2007/47/CE).

Classe d'isolation : appareil alimenté entièrement avec des parties appliquées de

type BF, conformément à la norme EN 60601-1.

Classification : IPX0, sur la base de la pénétration des liquides et de la poudre

; appareil non protégé.

Conteneur: ABS.

Alimentation: batterie interne rechargeable de 4,8V 800 mAh Ni/Mh

Limitations: appareil non adapté pour fonctionner dans des milieux à haute

concentration en oxygène et/ou liquides inflammables et/ou gaz inflammables ; ne pas utiliser avec des appareils d'électrochirurgie ou de thérapie à ondes courtes ou à micro-

ondes.

Fonctionnement appareil adapté au fonctionnement continu.

Canaux de sortie : 2 canaux indépendants et galvanisés

Courant distribué: 60mA de puissance maximale avec une charge de 1 Kohm.

Type d'impulsion : rectangulaire biphasique compensé.

Fréquence: train des impulsions 250Hz

Amplitude des impulsions: de 30 à 240µs.

Affichage: écran LCD réfléchissant.

Commandes: clavier en ABS à 6 touches.

Dimensiones: 114X68X26 mm.

Poids: 210gr. batteries incluses.

Manutention

et conservation: se référer aux indications contenues dans le chapitre 7 "Manutention et

conservation de MIO-VEIN".

Attention: l'appareil fournit un courant supérieur à 10 mA.

I.A.C.E.R. Srl 15 MNPG94-00



€ 0476 Produit conforme à la directive 93/42/CEE (et 2007/47/EC) sur les applications de type médical.MIO-VEIN.

14. Garantie.

En ce qui concerne la garantie faire référence aux lois nationales en contactant le distributeur national (ou directement le fabricant IACER).

MIO-VEIN. Tous droits réservés. MIO-VEIN et le logo sont la propriété exclusive d'I.A.C.E.R. Srl et sont enregistrés

I.A.C.E.R. Srl 16 MNPG94-00

I.A.C.E.R S.r.I. SU

Sede operativa: 30030 Martellago (VE) - Via. S. Pertini 24/A Tel +39 041 5401356 - Fax +39 041 5402684

Sede legale: S. Marco 2757 - 30124 Venezia Cod. Fisc./P.IVA IT 00185480274 R.E.A. VE.N. 120250 - M. VE001767 Cap.Soc. € 110.000,00 i.v.

www.iacer.ve.it - iacer@iacer.it