

ETHYLEC

éthylotest électronique à cellule électrochimique
Répond aux exigences de fiabilité NFX 20-704



Composition de la mallette

- 1 Ethylotest électronique « ETHYLEC »
- 10 Embouts buccaux (usage unique) avec clapet anti-retour
- 1 Pile 9V alcaline
- 1 Prise allume-cigare DC 12V adaptateur Jack
- 1 Pochette de rangement avec dragonne de transport
- 1 Notice d'utilisation multilingue

Présentation du produit

L'ETHYLEC est équipé d'un capteur de pression de souffle couplé à une cellule électrochimique, technologie qui garantit une grande fiabilité des résultats.

Que vous soyez particulier, entreprise, lieux festifs... l'ETHYLEC vous permet à tout moment de contrôler votre taux d'alcool.

AUTO-DEPISTAGE

=

PRISE DE CONSCIENCE + RESPONSABILISATION


Pour votre sécurité, si vous consommez de l'alcool ne conduisez pas

Caractéristiques techniques


- Cellule ELECTROCHIMIQUE
- Préchauffage : 15 secondes
- Temps de souffle : 7 à 8 secondes
- Puissance souffle : 10 L/min
- Précision : +/- 0,025 mg/L à 0,20 mg/L
- Affichage des mesures : 0,00 à 0,49 mg/L message «HI» au-delà
- Rappel : Seuil conventionnel 0,25 mg/L - Alarme sonore si seuil atteint
- Utilisation : 10°C - 40°C
- Stockage : 0°C - 50°C
- Compteur de test avec alarme de ré-étalonnage
- Calibrage : 12 mois ou 1200 tests au premier terme échu
- Détection de la pression et de l'interruption du souffle
- Dimensions : 115 x 60 x 23 mm
- Poids : 105 g sans pile
- Temps du test : moins de 60 secondes
- Indication : 3 chiffres sur écran LCD
- Alimentation : pile 9V ou adaptateur 12V
- Indicateur de batteries faibles

› Descriptif du produit

ETHYLEC

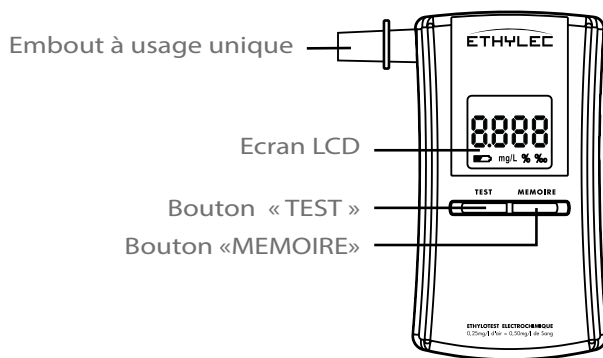


Sortie de souffle,
Attention : ne jamais obstruer.
Alimentation
DC 12V allume cigare

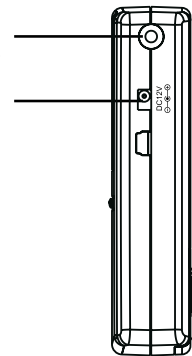


› Mode d'emploi


- Insérer un embout buccal sur le capteur (attention changer d'embout à chaque utilisation).

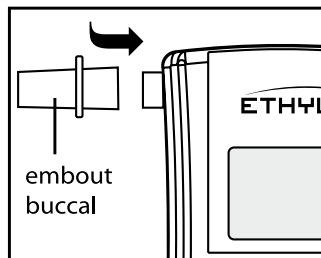


- Appuyer et maintenir le bouton «TEST». Relâchez une fois l'appareil allumé.

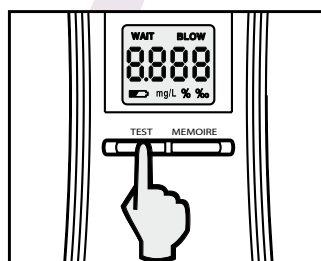


- Le mot «WAIT» (patienter) s'affiche sur l'écran et le compte à rebours se met en marche de 15 à 0.

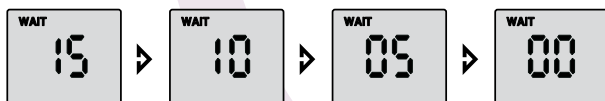

- Après le compte à rebours, le mot «BLOW» (souffler) s'affiche et la lettre « C » défile. Inspirer et souffler dans l'embout jusqu'à l'arrêt du BIP sonore (environ 6 à 8 secondes).

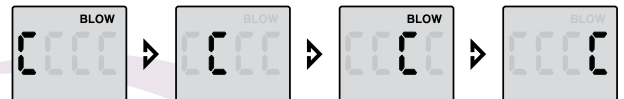


- Le mot «WAIT» apparaît puis le chiffre « 0 » défile, l'appareil calcule alors votre taux d'alcool.

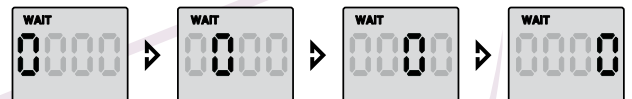

- Le résultat de votre test apparaît sur l'écran. Si le résultat dépasse 0,49 mg/L le mot «HI» s'affiche.
Rappel : Seuil contraventionnel 0,25 mg/L
Alarme sonore si seuil atteint.



- L'appareil peut afficher «Err» (erreur) si le souffle n'a pas été correct.

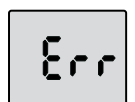

› Mode mémoire

Après vous être testé, l'appareil affiche votre résultat pendant 20 secondes. Pendant ce laps de temps, vous pouvez appuyer sur le bouton «MEMOIRE» pour vérifier vos résultats précédents. Le bouton «MEMOIRE» n'est disponible que pendant ces 20 secondes. Attendre 30 secondes après le dernier test pour refaire un nouveau test.



Les résultats obtenus ne sont pas opposables à ceux des forces de l'ordre

